

手洗いトレーニング・ボックス

グリッターバグ



感染防止は、手洗いから始まります。
大切なのは、洗った時間ではなく「正しい手洗い手技」です。
グリッターバグは、きちんと手が洗えているかを評価し、
トレーニングする教材です。

2. 手全体にローションが塗れているかどうかを、ボックスにかざして確認します。

3. 流水下で、普段と同じように石けんを使用して手を洗ってください。

1. ローションを手全体に均一に伸ばします。

4. 手洗いが完了したら、普段と同じようにペーパータオルで手を拭いてください。
注1) 手に水滴が残っていると、感電の危険がありますので、必ず完全に乾かしてください。

5. 再びボックスにかざして手を見ると、ローションが落ちなかった部分が白く光ります。
注1) 顔色が光るわけではありません。
注2) あくまでも光る部分は、洗い残しの目安です。

NITI-ON CO., LTD.



手洗いトレーニング・ボックス Glitter Bug™



① グリッターバグ・セット<スタンダード>

- グリッターバグ本体1台、ランプ1本、アダプター1個、ローション2本がセットになっています。
- これだけあれば、その日から手洗いトレーニングが始まります。

② グリッターバグ専用蛍光ローション

- 適量を手にとり、手の隅々に摺り込んでご使用ください。使用方法については、カタログ表をご覧ください。
- 1本240mlで、約150~300回ご使用いただけます。
- 最小購入単位は、12本(1ケース)です。

③ グリッターバグ専用蛍光パウダー


- 使用方法の一例
 - ① 手洗い講習会などで配布する資料にパウダーをふりかけます。
 - ② パウダーをふりかけたことは秘密にして、資料を読んだら、手渡して次の人にまわしてもらいます。
 - ③ 全員が、パウダーがついている資料に触れた後に、手をグリッターバグ本体にかざします。
 - ④ パウダーを細菌や病原菌に見たてることにより、交差感染の伝播メカニズムを効果的に学習できます。
- *この使用例は一例です。お客様のアイデアで使用方法が広がります。
- 最小購入単位は、12本(1ケース)です。



④ ランプ&ケース

⑤ 交換用ランプ

- ランプは、連続使用した場合、約300時間使用できます。
- 最小購入単位は、2本(1ケース)です。

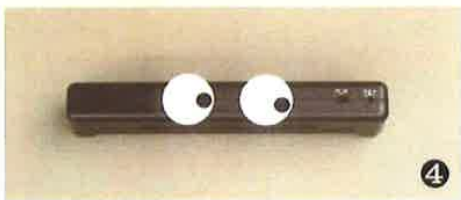

商品名	注文番号	数量/ケース	定 価
グリッターバグ・セット<スタンダード>	11-10100	1式	¥68,000
グリッターバグ専用ローション	11-90100	12本	¥52,800
グリッターバグ専用パウダー	11-90200	12本	¥52,800
ランプ&ケース	11-10200	1式	¥30,000
交換用ランプ	11-10300	2本組	¥8,000

本カタログのに掲載されている仕様・形状は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは



株式会社エムイーソフト

〒792-0864

愛媛県新居浜市東雲町2-10-36

TEL.0897-33-5878 FAX.0897-33-0319

http://www.mesoft.jp

E-MAIL: info@mesoft.jp

輸入販売元 株式会社ニチオン